


Cara Penggunaan Software DIANING - Deteksi Dini Bayi Kuning




1. Buka software DIANING, terdapat berbagai pilihan menu. Secara umum, aplikasi ini berisi dua bagian, yang pertama informasi tentang bayi kuning seperti definisi, penyebab, kategori, tanda-tanda serta komplikasi pada bayi kuning. Bagian kedua adalah cara deteksi dini bayi kuning menggunakan kamera smartphone



2. Cara deteksi dini bayi kuning dilakukan dengan menekan tombol kamera dibagian bawah tengah, kemudian akan muncul kamera untuk mengambil foto bagian dada (keterangan di bagian atas), dilanjutkan lengan dan terakhir bagian dahi. Untuk mengambil foto, tekan pada tulisan **SNAP**, untuk pengambilan pakai kamera depan, tekan pada **FLIP** dan jika kondisi gelap tekan **FLASH**

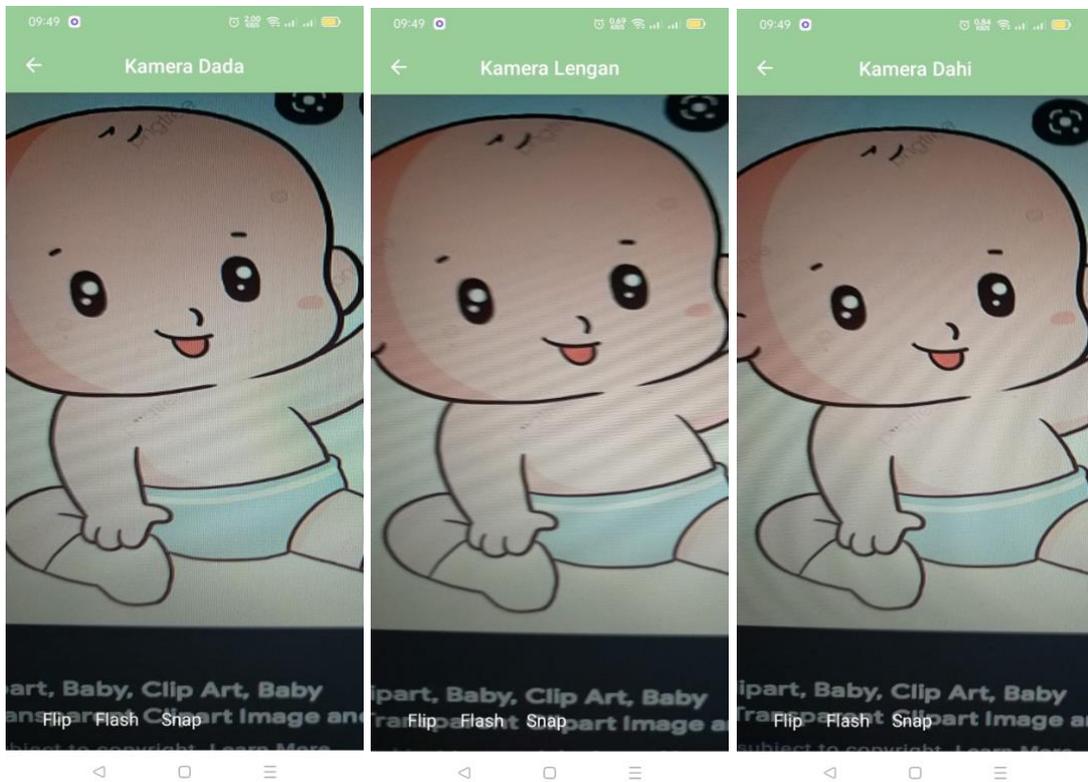

3. Setelah pengambilan foto selesai, maka akan ada pilihan profil gambar yang akan di kalkulasi, tekan pada **AVERAGE** di bawah masing-masing foto Dada, Lengan dan Dahi

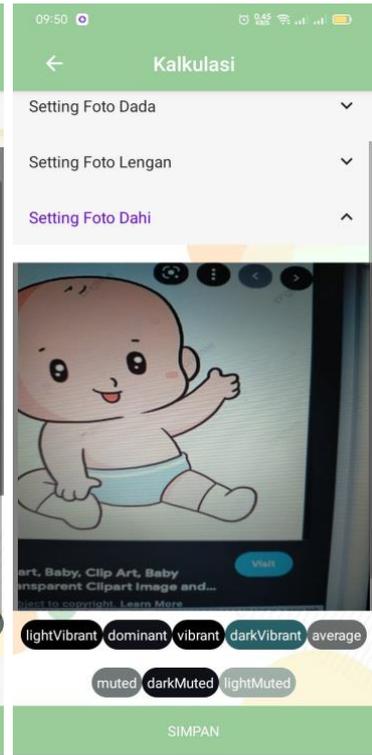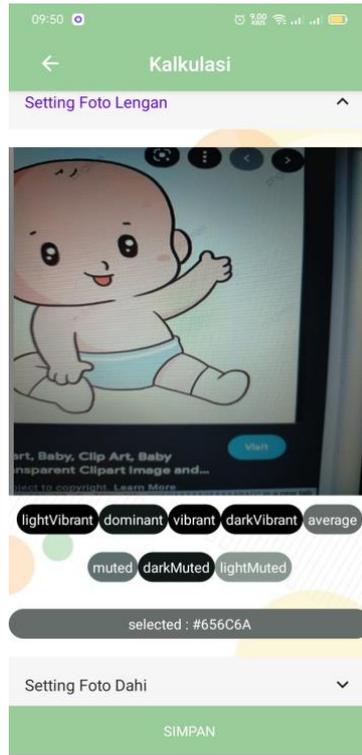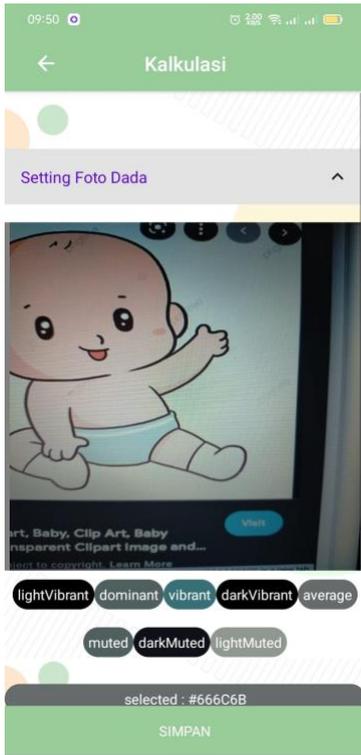

- Selanjutnya, sentuh tombol **HITUNG** untuk kalkulasi perkiraan kadar bilirubin pada bayi. Kadar bilirubin akan di tampilkan di bawah dalam satuan mg/dl



- Hasil perhitungan selanjutnya dapat disimpan. Untuk mengambil gambar dan menghitung kadar bilirubin bayi yang lain, sentuh tombol **Ambil Foto** kembali, dan dilakukan dengan cara yang sama.