



Cara Penggunaan Software DENIA - Deteksi Dini Anemia

1. Download Aplikasi DENIA di google playstore dan install:

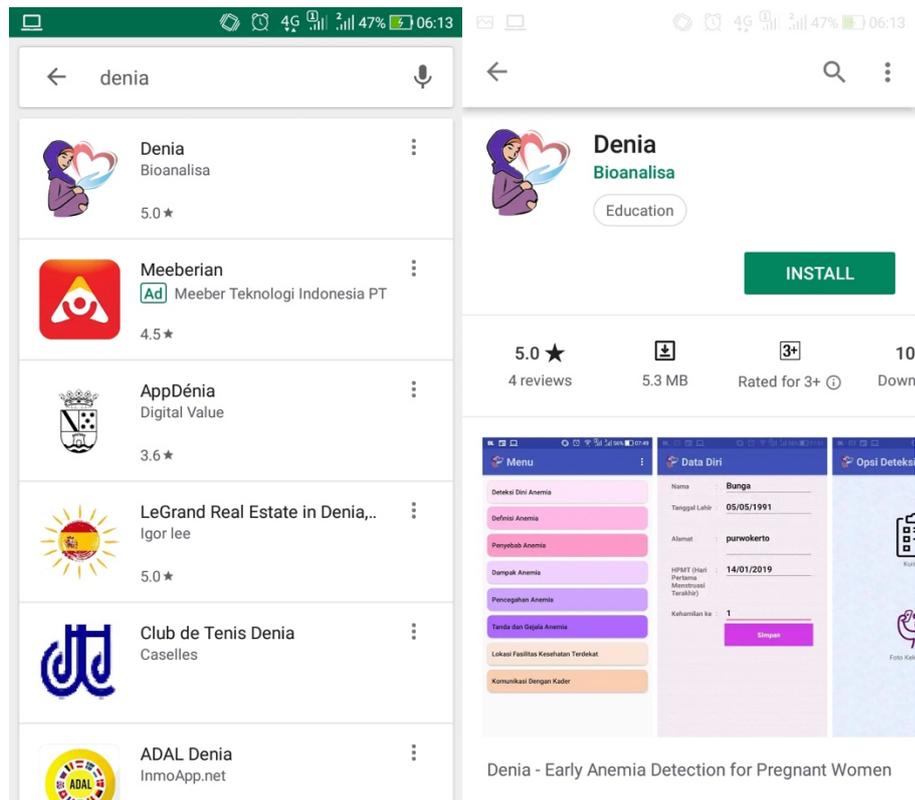

2. Buka software DENIA, terdapat berbagai pilihan. Pertama isi data diri dengan sentuh tiga titik di kanan atas.

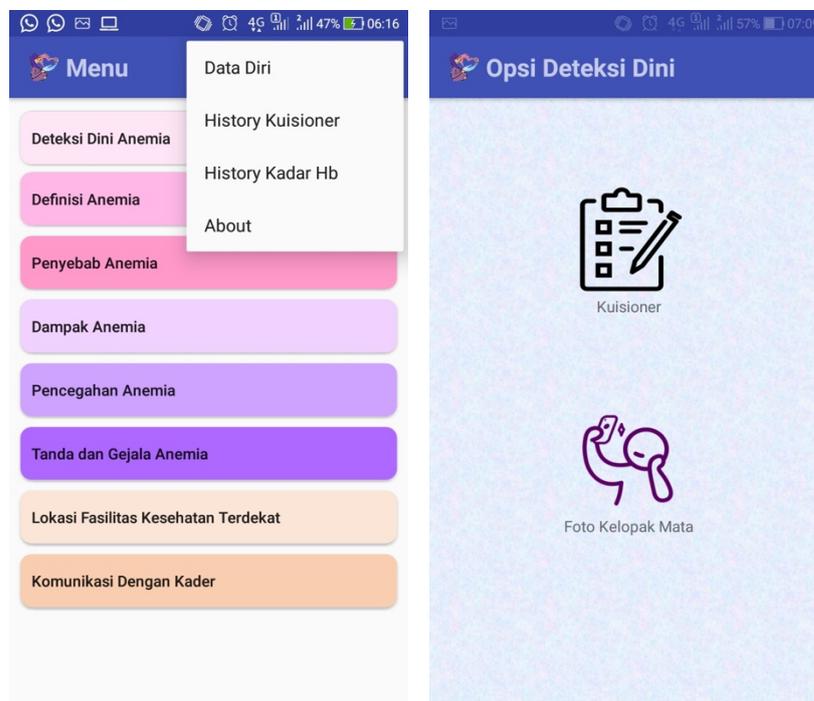

3. Menu deteksi dini anemia dapat dilakukan menggunakan kuesioner dan foto diri
4. Deteksi anemia dengan foto kelopak mata dilakukan dengan cara:
 - a. Cari lokasi yang cukup terang cahayanya
 - b. Pilih "PICK IMAGE"
 - c. Pilih "From Camera"
 - d. Tarik kelopak mata bagian bawah, kemudian bola mata lurus atau melihat ke atas
 - e. Tekan ambil gambar kamera, sampai diperoleh gambar seperti contoh
 - f. Tekan gambar kelopak mata bawah, kemudian pilih "CALCULATE"
 - g. Hasil prediksi kadar Hb akan terlihat, kemudian tekan "SIMPAN"
5. Prediksi anemia dengan kuesioner dapat mengikuti petunjuk yang ada di smartphone
6. Selanjutnya informasi-informasi lain dapat dipilih dan dibaca seperti Definisi anemia, Penyebab Anemia, Dampak Anemia, Pencegahan, Tanda dan Gejala Anemia
7. Terdapat pula fasilitas untuk mencari Rumah Sakit / Fasilitas Kesehatan terdekat dari lokasi pengguna
8. Menu terakhir adalah komunikasi hasil uji dengan Kader Kesehatan terdekat

The screenshot shows a mobile application interface with a blue header titled "Komunikasi Dengan Kader". Below the header is a form with the following fields:

Nama	: Saritem
Umur	: 28 tahun
Alamat	: perum indah
Usia Kehamilan	: 32 minggu 0 hari
Kehamilan ke	: 2
Prediksi Anemia Kuisisioner	: 100.00
Prediksi Kadar Hb	: 6.542869 mg/dL
Berat Badan	: _____ kg
Tekanan Darah	: _____ / _____ mmHg

At the bottom of the form is a purple button labeled "Kirim".

